

CHECKLISTE BETRIEBSPAUSEN VON HYGIENE-GERÄTEN



Vor einer Stilllegung der Hygiene-Geräte sollten alle Medizinprodukte aufbereitet sein. Grundsätzlich sollten Sie Autoklaven, Desinfektor, Steri und andere Geräte immer entsprechend der Herstellerinfo außer Betrieb setzen. Die typischen Schritte haben wir dennoch einmal zusammengefasst.

Sterilisator

- Tür öffnen und Gerät ausschalten.
- Bei Geräten mit interner Wasserversorgung (Tank) müssen beide Tanks entleert und gereinigt werden (faserfreie Tücher verwenden). Bei Geräten mit externer Wasserversorgung (Aufbereitung) den Wasserzulauf schließen.
- Netzstecker ziehen.
- Im Ionenaustauscher bei längeren Standzeiten Kartuschen austauschen lassen, da sich auch hier die Keime vermehren können.

DAC Universal

- Wöchentliches „Check & Clean“ durchführen.
- Wassertank entleeren und Tank reinigen (faserfreie Tücher verwenden).
- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

Siegelgeräte

- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

CHECKLISTE BETRIEBSPAUSEN VON HYGIENE-GERÄTEN



RDG

- Prozessmedien (Chemie) entfernen.
- Lanzen in einen Eimer mit Wasser legen und das System entlüften.
- Gerät ausschalten.
- Wasserzulauf schließen.
- Netzstecker ziehen.

Zubehör

Drucker, Etikettendrucker, Geräte für die Protokollaufzeichnung (z.B. MP-Dios Log, Melaflash)

- Protokolldaten auslesen und sichern.
- Geräte ausschalten und Netzstecker ziehen.

Auch an Hygiene-Geräte (DAC, Steri, Thermodesinfektor) können Schäden entstehen, wenn sie zu lange außer Betrieb sind. Wer sich an die Empfehlungen der Hersteller hält, und die Geräte entsprechend auch während der Betriebspause gemäß den Vorgaben durchlaufen lässt, ist auf der sicheren Seite.